

# Desinet-compact Konzentrat

## Aldehydfreies flüssiges Desinfektionsreiniger-Konzentrat

- ▲ EN-geprüftes und VAH-/IHO-gelistetes Reinigungs- und Desinfektionsmittel für die Flächendesinfektion
- ▲ Frei von Aldehyden, Phenolen und metallorganischen Wirkstoffen
- ▲ Reinigungsaktiv und geruchsneutral
- ▲ Wirksam gegen grampositive und gramnegative Bakterien (inkl. Salmonellen und Listerien), Hefen und behüllte Viren (begrenzt viruzid inkl. HIV, HBV, HCV, SARS-CoV-2)
- ▲ Geeignet zur Desinfektion von Acrylglas
- ▲ Eine Unbedenklichkeitsbescheinigung für den Einsatz im Lebensmittelbereich liegt vor



### Anwendungsbereich

Zur Reinigung und Desinfektion von wasserbeständigen Boden-, Wand-, Decken- und Mobiliarflächen in hygiene relevanten Bereichen. Auch auf beschichteten Bodenbelägen anwendbar.

### Anwendung

Vor der Erstanwendung ist die Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle zu überprüfen. 1 Dosierung = 25 ml.

#### Herstellen der Gebrauchslösung:

Lösung immer mit kaltem Wasser ansetzen! Dosierung siehe Tabelle. 2-L- und 5-L-Gebinde mit geeignetem Kiehl-Dosiersystem (z. B. DosiStation, Arcantec, DosiJet) verwenden.

#### Desinfizierende Reinigung:

Fläche mit Desinfektionslösung vollständig (ca. 15–20 ml/m<sup>2</sup>) benetzen und mit Reinigungstextil oder Reinigungsgerät bearbeiten. Verbrauch: 0,1 ml/m<sup>2</sup>.

Flächen und Küchengeräte, die direkt mit Lebensmitteln in Kontakt kommen, nach der Einwirkzeit gründlich mit Trinkwasser spülen.



#### Hinweise

Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden. Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art. 1! Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. DE: BAuA Reg.-Nr. N-72134, CH: Eidg. Zul. CHZN1588, PT 02, PT 04

#### Produktzusammensetzung (nach 648/2004/EG)

Nichtionische Tenside 5–15 %, wasserlösliche Lösungsmittel, Biozide.  
pH-Wert (Konzentrat): ca. 9,5

pH-Wert (Gebrauchslösung): ca. 7,5

#### Wirkstoffe in 100 g:

10,0 g Didecyldimethylammoniumchlorid (CAS: 7173-51-5), 11,0 g N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin (CAS: 2372-82-9), 14,5 g Phenoxyethanol (CAS: 122-99-6).

| Artikelnummer | Verpackungseinheit (VPE)          | Anzahl VPE je Palette |
|---------------|-----------------------------------|-----------------------|
| j350354       | 240 x 25 ml Dosierbeutel (Karton) | 48                    |
| j350302       | 6 x 1 L Dosierflaschen (Karton)   | 84                    |
| j350308       | 3 x 2 L Flaschen (Karton)         | 130                   |
| j350305       | 2 x 5 L Kanister (Karton)         | 56                    |

# Desinet-compact Konzentrat

## Aldehydfreies flüssiges Desinfektionsreiniger-Konzentrat

### Kennzeichnung

Kennzeichnung (im Konzentrat): GHS05, GHS07, GHS08, GHS09, Gefahr. H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. P308+P313 BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. P391 Verschüttete Mengen aufnehmen. Enthält: Didecyldimonium Chloride / Laurylamine Dipropylenediamine (INCI)

### Prüfungen und Listungen

#### Dosierempfehlung für die Flächendesinfektion im Gesundheitswesen

| Prüfmethode   | Wirksamkeitsspektrum          | Belastung | Dosierung |            | Einwirkzeit | Prüfkeime   |
|---|-------------------------------|-----------|-----------|------------|-------------|---|
| EN 16615 / 4-Feldertest VAH-zertifizierte Anwendungsempfehlung zur Flächendesinfektion mit Mechanik | bakterizid / levurozid        | hoch      | 0,5 %     | 50 ml/10 L | 60 min      | Staphylococcus aureus inkl. MRSA, Enterococcus hirae, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Modifiziertes Vaccinia-virus Ankara (MVA) |
| EN 16777 Quantitativer Oberflächenversuch   | begrenzt viruzid <sup>1</sup> |           |           |            |             |   |

#### Dosierempfehlung für die Flächendesinfektion im industriellen, institutionellen und Lebensmittelbereich

| Prüfmethode                                | Wirksamkeitsspektrum          | Belastung | Dosierung |            | Einwirkzeit | Prüfkeime   |
|--|-------------------------------|-----------|-----------|------------|-------------|---|
| EN 13697 Flächendesinfektion ohne Mechanik | bakterizid / levurozid        | hoch      | 0,5 %     | 50 ml/10 L | 60 min      | Staphylococcus aureus inkl. MRSA, Enterococcus hirae, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Modifiziertes Vaccinia-virus Ankara (MVA) |
| EN 16777 Quantitativer Oberflächenversuch  | begrenzt viruzid <sup>1</sup> |           |           |            |             |   |

### Weitere Prüfungen

| Prüfmethode                               | Wirksamkeitsspektrum   | Belastung | Dosierung |            | Einwirkzeit | Prüfkeime  |
|---|------------------------|-----------|-----------|------------|-------------|--|
| <b>medizinischer Bereich</b>              |                        |           |           |            |             |  |
| EN 16615 / 4-Feldertest                   | bakterizid / levurozid | hoch      | 0,5 %     | 50 ml/10 L | 15 min      | Staphylococcus aureus inkl. MRSA, Enterococcus hirae, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans |
| EN 13727 Quantitativer Suspensionsversuch | bakterizid             | hoch      | 0,5 %     | 50 ml/10 L | 1 min       | Staphylococcus aureus inkl. MRSA, Enterococcus hirae, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa                   |
| EN 13624 Quantitativer Suspensionsversuch | levurozid              | hoch      | 0,5 %     | 50 ml/10 L | 5 min       | Candida albicans   |

<sup>1</sup>gemäß RKI-Empfehlung Bundesgesundheitsblatt 01-2004, siehe auch [www.desinfektionsmittelliste.de](http://www.desinfektionsmittelliste.de)

# Desinet-compact Konzentrat

## Aldehydfreies flüssiges Desinfektionsreiniger-Konzentrat

| Prüfmethode  | Wirksamkeitsspektrum                                       | Belastung    | Dosierung       |                          | Einwirkzeit    | Prüfkeime  |
|--|--|--------------|-----------------|--------------------------|----------------|--|
| <b>Viruzidie</b>   |  |              |                 |                          |                |  |
| EN 14476<br>Quantitativer Suspendionsversuch                   | begrenzt viruzid <sup>1</sup>                              | gering       | 0,25 %<br>0,5 % | 25 ml/10 L<br>50 ml/10 L | 1 min<br>1 min | Modifiziertes Vacciniavirus Ankara (MVA)   |
|  |  | hoch         | 0,5 %           | 50 ml/10 L               | 60 min         |  |
| EN 16777<br>Quantitativer Oberflächenversuch                   | begrenzt viruzid <sup>1</sup>                              | hoch         | 0,5 %           | 50 ml/10 L               | 60 min         | Modifiziertes Vacciniavirus Ankara (MVA)   |
| DVV/RKI<br>Quantitativer Suspendionsversuch                    | begrenzt viruzid <sup>1</sup><br><br>weitere Wirksamkeiten | mit und ohne | 0,25 %          | 25 ml/10 L               | 30 min         | BVDV (Surrogat für HCV), Vacciniavirus   |
|  |  | mit und ohne | 2 %             | 200 ml/10 L              | 120 min        | Murines Norovirus (MNV)  |
|  |  | ohne         | 0,25 %          | 25 ml/10 L               | 15 min         | Rotavirus  |
| <b>industrieller, institutioneller und Lebensmittelbereich</b> |  |              |                 |                          |                |  |
| EN 1276<br>Quantitativer Suspendionsversuch                    | bakterizid   | hoch         | 0,5 %           | 50 ml/10 L               | 1 min          | Staphylococcus aureus inkl. MRSA, Enterococcus hirae, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa |
| EN 1650<br>Quantitativer Suspendionsversuch                    | levurozid  |              |                 |                          | 5 min          | Candida albicans   |

<sup>1</sup>gemäß RKI-Empfehlung Bundesgesundheitsblatt 01-2004, siehe auch [www.desinfektionsmittelliste.de](http://www.desinfektionsmittelliste.de)